

**Gebrauchsinformation!**  
Bitte aufmerksam lesen!



## Sicherheit für die Dritten. Protefix®

### Protefix® Haft-Polster für Ober- und Unterkieferzahnprothesen

#### Anwendungsinformation



- 1. Oberkiefer-Prothese**  
Bei kleinen Prothesen das Polster mit einer Schere passend zuschneiden (siehe Abbildung). Danach das Polster 10 Sek. in handwarmes Wasser tauchen und abtropfen lassen.




- 1. Unterkiefer-Prothese**  
Bei kleinen Prothesen das Polster passend zuschneiden. Polster anfeuchten und auflegen wie beim Oberkiefer.



- 2.** Polster auf die befeuchtete Prothese legen. Die hinteren 2 mm müssen unbedeckt bleiben. Polster mit beiden Daumen andrücken (in der Mitte beginnend) bis es überall glatt anliegt.



- 2.** Polster mit Zeigefinger in die Vertiefung der Prothese drücken (in der Mitte beginnend) bis es überall anliegt.

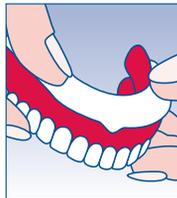

#### Anwendungsgebiete

Haftmittel für Zahnprothesen.

#### Wichtige Hinweise

Nur auf der gesunden Schleimhaut anwenden. Aus hygienischen Gründen ist das **Protefix®** Haft-Polster mindestens einmal täglich zu wechseln. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden. Die Anwendung von Haft-Polstern sollte nur zeitweilig erfolgen. Lassen Sie den Sitz Ihrer Prothese regelmäßig überprüfen.

#### Zusammensetzung

Vlies bestehend aus Natriumalginat, Viskose-Faser, Polypropylen-Faser.

#### Gegenanzeigen

Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.

#### Nebenwirkungen

In Einzelfällen sind Überempfindlichkeitsreaktionen an der Mundschleimhaut oder auch des Gesamtorganismus nicht auszuschließen. Bei Verdacht auf Vorliegen einer Überempfindlichkeitsreaktion nehmen Sie bitte Kontakt mit einem Arzt auf.

**Protefix®** Haft-Polster möglichst trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

**Nur für Vollprothesen. Nicht für Teilprothesen oder kombinierten Zahnersatz (Cover-Denture, Teleskope, Konuskronen, Anker, Geschiebe etc.).**



Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im 11/2011.

**Queisser**  
PHARMA

D-24914 Flensburg  
www.queisser.de

Vertrieb in der Schweiz:  
Biomed AG  
Überlandstr. 199  
CH-8600 Dübendorf

